

Fiche technique masque hygiénique

Produit

Référence:	DM8712
Description:	Professional 3 Ply mask 2R
Degré de filtration:	99,80%
Degré de respirabilité:	59,8 Pa/cm2
Données Aitex:	2020TM4089
	Tests selon Norme NE 14683: 2019

Dimension du masque

Largeur (mm):	110
Longueur (mm):	200

Présentation du paquet de masques

Unités/ Paquet:	50 unités
-----------------	-----------

Présentation paquet des masques

Type d'emballage:	Boîte en carton
Unités/ Paquet:	50 unités
Marque:	Northwood Healthcare
Code EAN 13:	8424140933561

Présentation colis


Type d'emballage:	Carton
Nb Paquet / colis:	20 paquets/colis
Nb unités/colis:	1000 masques par colis
Etiquette:	Northwood Healthcare
Code EAN 14:	18424140933568

Palettisation

Type de palette:	80 x 120
Mosaïque (base x hauteur):	4 x 11
Colis /palette:	44 colis /palette
Palette empilable:	NON




Placez le masque avec la face plissée vers l'extérieur

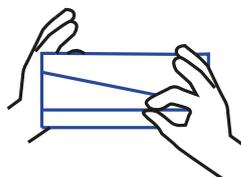

Tenir avec une main la partie extérieure du masque et avec l'autre main les bandelettes



Étirez la masque, placez-le devant le visage et passez les bandelettes par-dessus la tête

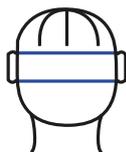

Ajustez la position des bandelettes derrière la tête



Ajustez la position des bandelettes sur la partie latérale de la tête



Ajustez sur le nez la partie frontale du masque

